


Conexión entre Estaciones de Trabajo de TAC.

Si por cualquier motivo necesitamos manipular las imágenes de un TAC realizado en otro hospital del Complejo Hospitalario distinto al que nos encontramos, podemos obtenerlas directamente conectando con el TAC de dicho hospital.

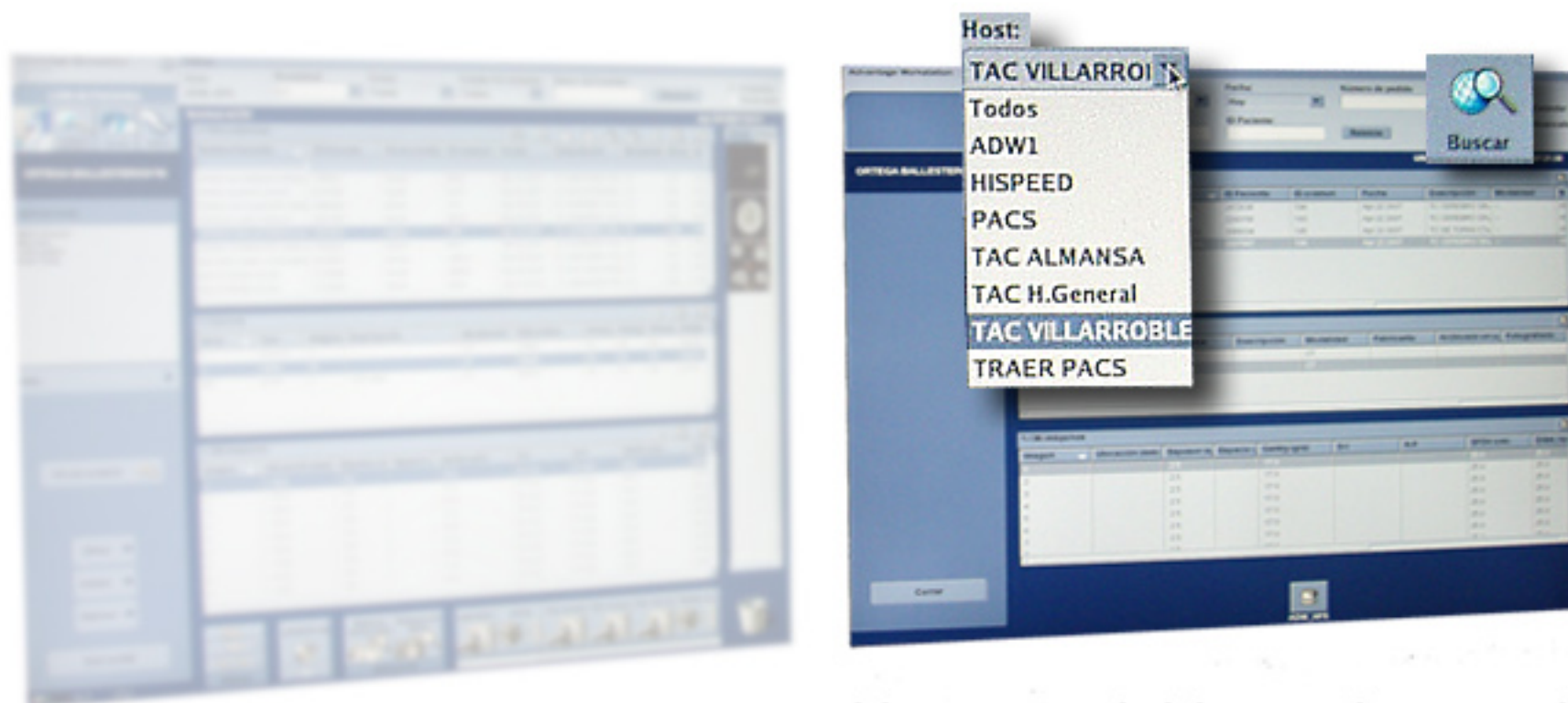

Para ello basta desplegar el menú HOST y elegir el hospital al cual deseamos conectarnos.

Una vez elgido, pulsamos la tecla BUSCAR.

Actualizada la lista de pacientes en nuestra Estación de Trabajo con los estudios que se han realizado en el hospital remoto, seleccionamos el paciente deseado y pulsamos la tecla OBTENER EXÁMENES SELECCIONADOS.

Nombre host	Nombre Paciente	ID Paciente	ID examen	Fecha	Descripción
TAC H.General	BLAZQUEZ ARENAS*GRESARIO	244021	244021	Apr 23 2007	TC CEREBRO SIM.
TAC H.General	CRUZ LOSA*GILBERTO	244021	244021	Apr 23 2007	TC ABDOMINO-PEL.
TAC H.General	ESPINOSA MUNOZ*EUSEBIO	244021	244021	Apr 23 2007	TC CEREBRO SIM.
TAC H.General	GARCIA CAZANA*JAVIER	244021	244021		
TAC H.General	GARCIA PALACIOS*EMILIA	244021	244021		

Y aceptamos...

Obtener

¿Obtener los exámenes seleccionados?

Sí No

Ya disponemos del estudio en nuestra Estación de Trabajo.

