


Envío de imágenes al PACS desde el TAC.

Paso 1

Para poder enviar un estudio al PACS debemos primero recuperar los datos del paciente desde la Worklist.

Para ello desde la barra de menús pulsamos las opciones **Study**, **Dicom** y por último **Worklist**.

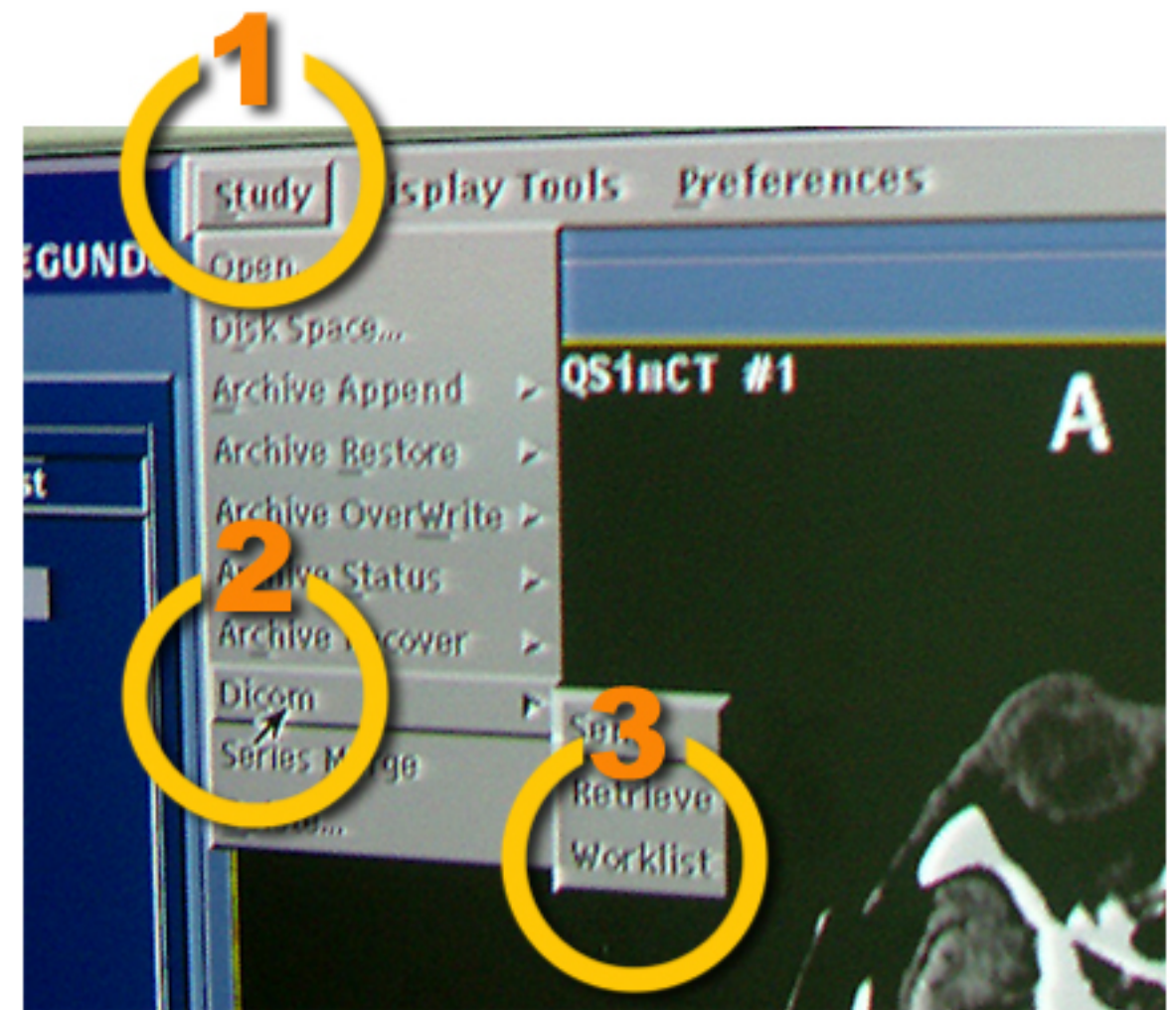

Paso 2

En la pantalla que se nos abre elegimos **RIS** dentro de la ventana **Destination** y pulsamos la tecla **Retrieve Worklist**.

Nos aparecerán los pacientes que previamente hemos citado en Dulcingest para la sala 10.

Elegimos el paciente y pulsamos la tecla **Retrieve**.



Paso 3

Ya tenemos los datos del paciente en **Patient Directory**.

Basta seleccionar el paciente a estudiar y al pulsar **OK** sus datos aparecerán en el nuevo estudio.

Nunca pulsar **NEW** como hacíamos hasta ahora o perderemos el estudio en el PACS.

