


Nos aseguramos que se ha creado Nuevo Informe para el paciente en Dulcingest y que ha sido asignado a una Sala de Ecografía.

Todos los ecógrafos se han conectado a la misma Lista de Trabajo para poder cambiar al paciente de Sala según las necesidades del Servicio sin necesidad de cambiarlo de Sala en Dulcingest.

Pulsamos en el ecógrafo la tecla Pacientes y nos aparecerá en la pantalla la Lista de Trabajo donde elegiremos el paciente a explorar.



A cada pulsación, esta tecla alterna en la pantalla del ecógrafo la página de Información del Paciente con la Vista de Exploración.

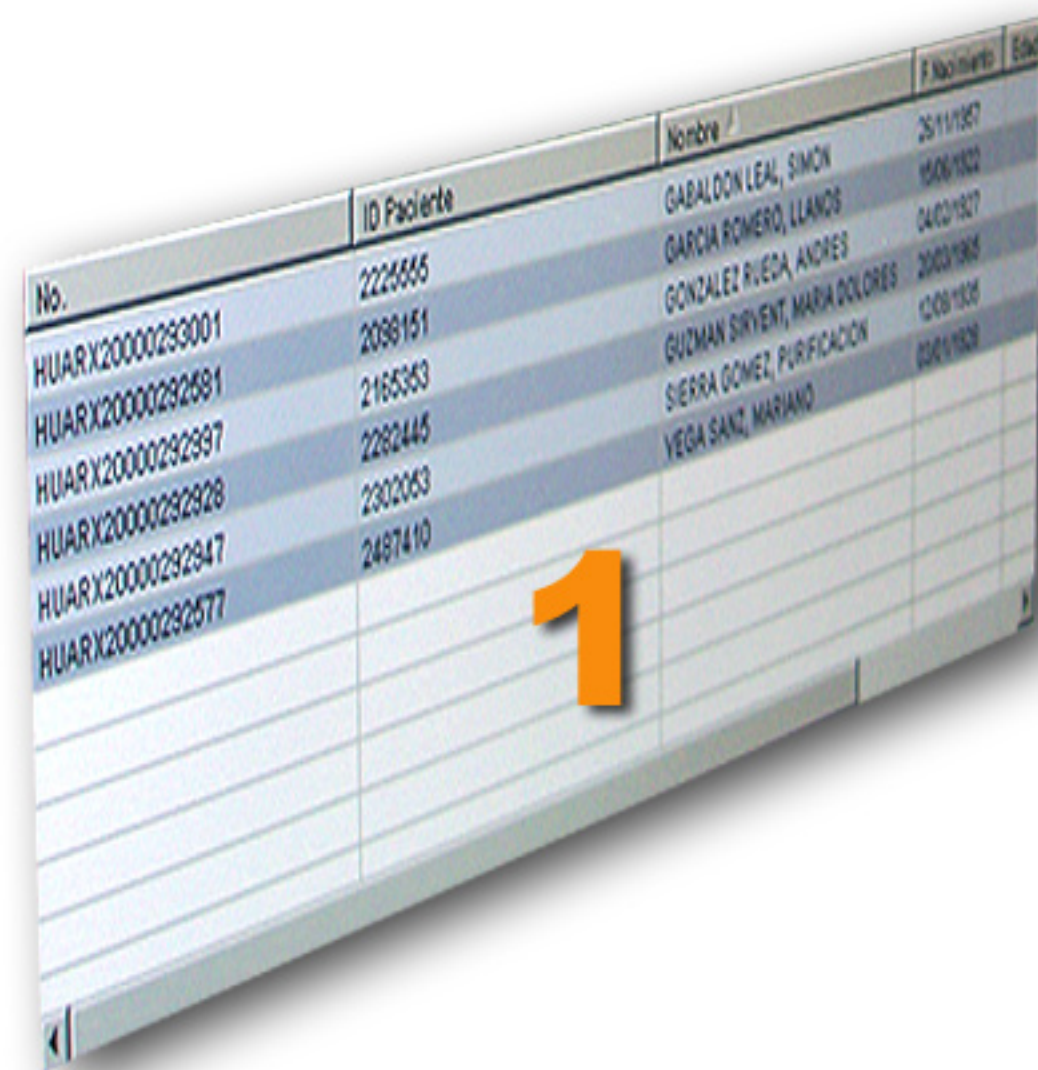


No.	ID Paciente	Nombre	F.Nacimiento	Edu
HUARX20000293001	2228886	GABALDON LEAL, SIMON	25/11/1987	
HUARX20000292981	2098151	GARCIA ROMERO, LINDS	15/06/1982	
HUARX20000292997	2165363	GONZALEZ RIVERA, ANDRES	04/02/1987	
HUARX20000292928	2282445	GUZMAN SIRVENT, MARIA DOLORES	20/03/1985	
HUARX20000292947	2002063	SIERRA GOMEZ, PURIFICACION	02/03/1988	
HUARX20000292677	2497410	VEGA SANC, MARIANO	03/01/1988	

Una vez seleccionado el paciente en la Lista de Trabajo, de la pantalla del ecógrafo, seleccionamos el tipo de exploración que le vamos a realizar y procedemos a practicar la ecografía.

Cada imagen capturada durante la exploración por el radiólogo, es enviada al PACS de forma automática.

La última imagen capturada durante la exploración es enviada al PACS también de forma automática cuando volvemos a seleccionar otro paciente, entendiéndose que hemos acabado con la exploración en curso.

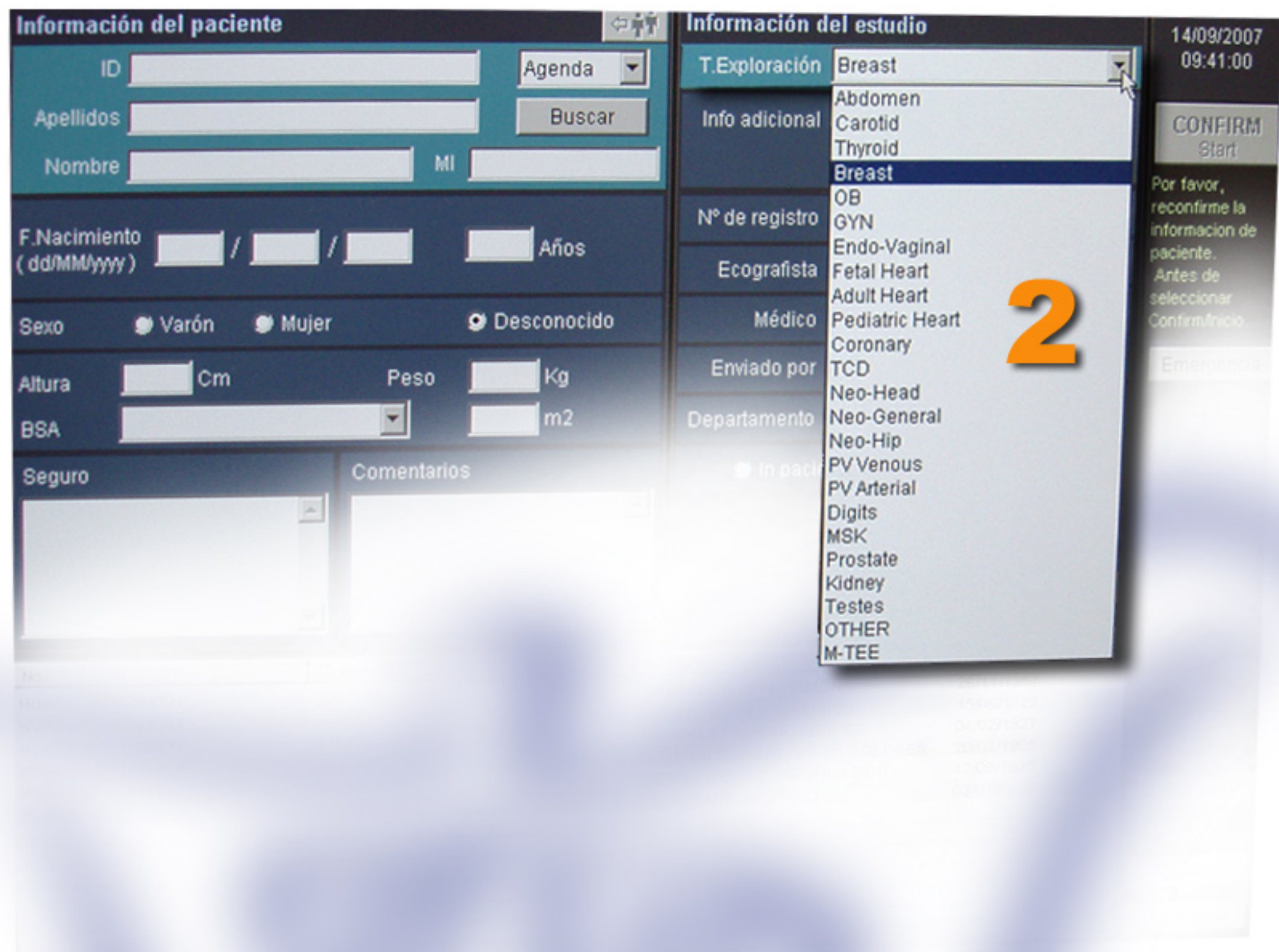

Información del paciente

ID Agenda

Apellidos

Nombre MI

F.Nacimiento (dd/MM/yyyy) / / Años

Sexo Varón Mujer Desconocido

Altura Cm Peso Kg

BSA m2

Seguro Comentarios

Información del estudio

T.Exploración

Info adicional

Nº de registro

Ecografista

Médico

Enviado por

Departamento

14/09/2007 09:41:00

Por favor, reconfirme la información de paciente. Antes de seleccionar Confirmación.