

Limpieza de las pantallas de fósforo de KODAK

Materiales necesarios

Utilice sólo los limpiadores de pantallas recomendados de *Kodak*:

Solución antiestática limpiapantallas intensificadora *Kodak*

Limpiador de pantallas *Kodak Min-R*

Toallitas limpiapantallas *Kodak Min-R*

Utilice un paño limpio, seco y suave que no suelte pelusa para quitar el polvo y aplicar la solución.

Lea y siga las instrucciones especificadas en las hojas de datos de seguridad del material (MSDS, del inglés Material Safety Data Sheets) sobre las soluciones de limpieza recomendadas.

Procedimiento de limpieza

Use guantes suaves de un tejido que no suelte pelusa. No toque el lateral blanco (fósforo) directamente con las manos.

1. Coloque la pantalla con el lateral blanco (fósforo) hacia arriba.
2. Pase un paño por la pantalla con suavidad para quitarle el polvo.
3. Siga las instrucciones del limpiador de pantallas de *Kodak* que haya elegido.
4. Seque la superficie con un paño suave y limpio que no suelte pelusa.

Desinfección de la pantalla

Siga estos pasos para desinfectar la pantalla:

1. Moje bien (sin empapararlo) un paño de tejido suave que no suelte pelusa con una solución blanqueadora diluida. Diluya una parte de hipoclorito de sodio al 5,25 % en nueve partes de agua. Déjelo actuar sobre la superficie contaminada durante un máximo de 15 minutos.
2. Limpie los restos de solución blanqueadora con un paño suave que no suelte pelusa mojado en agua.
3. Retire la solución con un paño suave que no suelte pelusa y deje secar al aire.

PRECAUCIÓN: El uso de una solución blanqueadora diluida puede provocar irritación ocular y sequedad de la piel. Lávese las manos con agua y jabón después de su uso. Consulte las hojas de datos de seguridad del material para obtener más información antes de su utilización.

No exponga las pantallas a los siguientes elementos:

- materiales que contengan peróxidos
- alcohol isopropílico
- limpiadores a base de cítricos
- lociones para las manos
- desinfectantes para las manos que no precisen agua
- agentes tensoactivos
- lubricantes
- humedad excesiva



Visite www.kodak.com para ver la actualización de esta información.

N.º CAT. 889 5609 N.º parte 5H1409_es-es 6/2005 ©Eastman Kodak Company, 2005 Health Group TM: Kodak, Min-R, A Better View of Life A BETTER VIEW OF LIFE.

HEALTH GROUP

