

# Envío de Ortopantomografías al PACS.

Una vez introducidos los datos del paciente en Dulcingest iniciamos el programa Dimaxis Pro de la forma habitual.




Automáticamente nos aparece nuestra lista de trabajo.

ID del paciente	Nombre	Fecha de		Fecha	Hora	Descripción	Número de acceso
2022116	DE PRUEBAS HISTORIA	19610101	PX	13/06/2007	12:09	ORTOPANTOMOGRAFIA	HUARX10000228416
159487	ALVAREZ DIEZ NIEVES	19611112	PX	13/06/2007	13:32	ORTOPANTOMOGRAFIA	HUARX10000228520

Tamaño de 2 | :hero de registri | Actualizar | Detalles... | OK | Cancelar

Seleccionamos al paciente que vamos a explorar pulsando un doble clic sobre él.

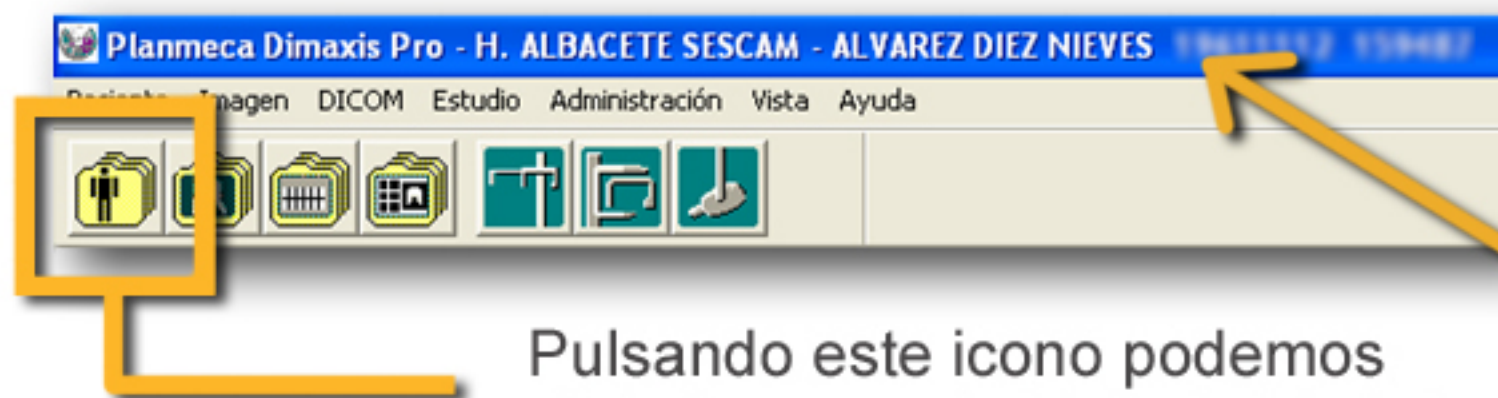

... sabremos que está seleccionado porque su nombre aparece en el título de página.

Pulsando este icono podemos abrir de nuevo la Lista de Trabajo para seleccionar otro paciente.



Realizada la exploración y una vez ajustada la imagen a nuestro gusto, solo debemos pulsar el icono **Almacenamiento DICOM** y tras pulsar OK en la siguiente ventana, será enviada al PACS automáticamente.

